



INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING AV BANO-BADRUM

Optimalt samspel mellan användaren och vårdaren

DESIGNED FOR CARE



MÅLSÄTTNING

Målsättningen med det här dokument är att ge en övergripande information för hur du använder Bano-badrummet. Det ska ge insikt i alla de olika alternativ du har för att fullt kunna använda badet, både för vårdpersonal och den boende. Personalen ska kunna lära den boende att utnyttja badet självständigt i möjligaste mån, så att den äldre får trygghet att röra sig själv.

Det är önskvärt att så många av personalen som möjligt får den här informationen och att en person tar ansvaret för att lära den övriga personalen och nyanställd personal, så att alla i framtiden kan utnyttja badrummet optimalt samt lära den boende att använda det så självständigt som möjligt..

Vårt koncept innebär att placeringen av de olika badrumsprodukterna är noga genomtänkt. Alla produkter är utformade efter många år av tester och användning för att ge bästa möjliga funktion.



Det är viktigt att lägga märke till betydelsen av att den boende kan se alla möjligheter han/hon faktiskt har att klara sig självständigt. Här är personalens betydelse i centrum, eftersom personalen kan ge rätt information om hur badets alla element kan användas och på så sätt upprätthålla den funktion och den muskelkraft som personen ännu har i behåll. För att underlätta personalens belastning är det väsentligt att du gör en värdering av den boendes resurser utifrån hans/hennes synvinkel och tar upp det i den eventuella vårdplanen.



HÖJDJUSTERING

Bano-badrummet ger möjlighet till höjdjustering av tvättställ, toalett, stödhandtag vid toaletten och duschsitsen. Det är mycket viktigt att se till att badrummets alla element - tvättstället, toaletten, stödhandtaget och duschsitsen - placeras på rätt höjd för den boende.

Så här justerar du toaletten i höjd:

- Tag av de vita plastskyddskåporna på muttrarna som finns på båda sidorna av toaletsitsen.
- Använd en skiftnyckel eller hylsnyckel (nr. 44) till att skruva upp muttrarna på båda sidorna och justera sedan toaletten till rätt höjd. Skruva fast muttrarna och sätt på skyddskåporna.

Höjdjusteringen sker individuellt tillsammans med den boende. Det är viktigt att lägga märke till skillnaden mellan en person som står rakt, är böjd eller som sitter i rullstol (se bilderna).





Om personen sitter i rullstol bör du tänka på vilken räckvidd personen har och i vilken utsträckning han/hon kan använda den. Om personen kan luta sig framåt något ger det genast en större funktion än om han/hon är tvungen att luta sig mot rullstolens ryggstöd. I så fall måste tvättställets höjd vara något högre än om personen kan luta sig framåt. När personen står bör axelpartiet vara så avslappnat som möjligt, så att han/hon inte behöver spänna sig.



FUNKTIONEN

När du kommer in i badrummet tar du stöd i stödhandtaget bredvid skåpet. Sedan fortsätter du att stöd i tvättställs stödhandtag till toaletten och sedan vidare till duschzonen.

På duschsitsen sitter du tryggt. Duschhyllan är flyttbar och kan placeras på lämplig plats. Du kan ta stöd i duschstången och hålla i dig i den (se bilden). Duschsitsen ska justeras till en höjd som gör det lätt för den boende att både sätta sig ned och att stiga upp (se bilden).

När du sitter på toaletten kan du stödja dig i stödhandtaget intill toaletten eller på handtagen på tvättstället. Du kan ta stöd i tvättställs stödhandtag både när du sätter dig ned eller stiger upp.







Bano Sverige AB

Malmskillnadsgatan 58
111 38 Stockholm

Telefon: +46 8 301110

Fax: +46 8 651 16 22

www.bano.se